



Maymom 乳首用ノギス

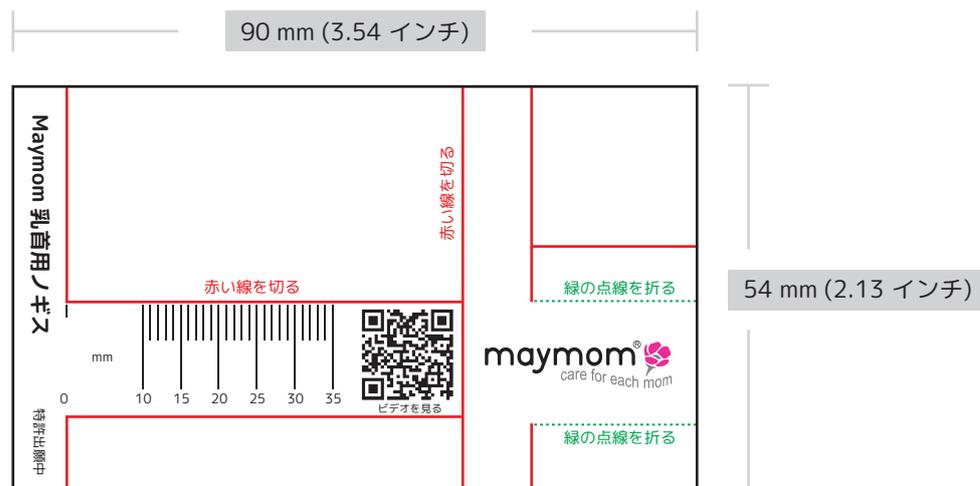

作り方

1. このページをA4やレター用の紙に100%の縮尺で印刷する。正しいサイズを得るため、横の線が90mmまたは3.54インチになるように印刷設定を調整する。
2. 赤い線を切る。
3. 緑の点線を折る。
4. 完成した乳首用ノギスとその使い方については、以下のイメージ図を参照してください。

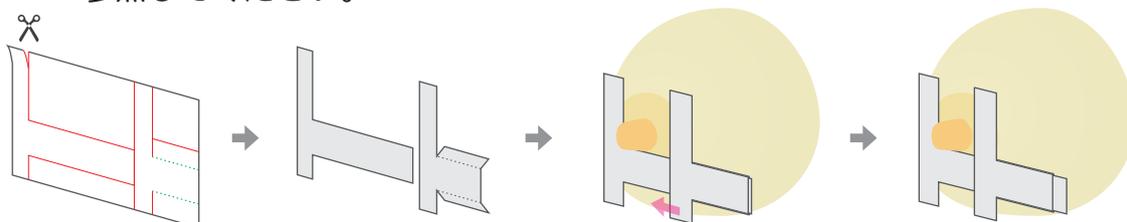

5. 搾乳の後、乳首の直径を測定する。
6. 搾乳の前、乳首直径より3~5mm大きい搾乳口のサイズを試すことをお勧めします。あるいは搾乳の後、乳首直径より1~2mm大きいさく乳口を選んでください。

例

搾乳の後、乳首の直径は18mmの場合は、19mmの搾乳口に適する。
搾乳の前、乳首の直径は18mmの場合は、21mmの搾乳口を試してください。