


## Maymom 乳頭尺

### 製作步驟

1. 用A4或Letter（或其他尺寸）的紙張以100%等比例方式印出本頁。調整列印設定確保長邊為90公厘或3.54英吋。
2. 沿著紅線剪開。
3. 沿著綠色虛線折起。
4. 參照下方示意圖來完成與使用。

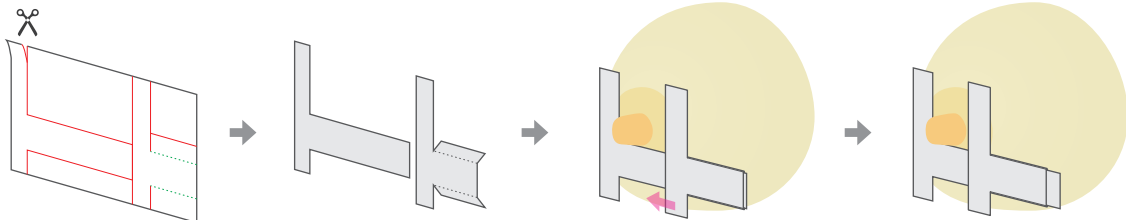

5. 在吸乳後測量乳頭直徑。
6. 挑選比乳頭直徑還要大1~2公厘的喇叭罩尺寸；若是在吸乳前測量，僅能推測接近的尺寸，比乳頭直徑還要大3~5公厘。

### 範例

- 若吸乳後乳頭直徑為18公厘，適用尺寸19公厘的喇叭罩。
- 若吸乳前乳頭直徑為18公厘，可先試用尺寸21公厘的喇叭罩。